


 **Paragard®** T380A

intrauterine copper contraceptive

simple, honest
pregnancy prevention™

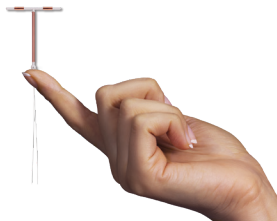

*Biện pháp
tránh thai*

**HOÀN TOÀN,
TUYỆT ĐỐI
100%
KHÔNG CHỨA
HOOC-MÔN**



Paragard là một IUD (dụng cụ tránh thai đặt tử cung) không chứa hooc-môn cho hiệu quả tránh thai trên 99%. Sản phẩm này phát huy tác dụng theo cách khác bằng cách sử dụng một hoạt chất đơn—đồng—thay vì hooc-môn.

Không sử dụng Paragard nếu quý vị bị viêm nhiễm vùng chậu hoặc mắc một số loại bệnh ung thư nhất định. Dưới 1% người dùng bị nhiễm trùng nghiêm trọng gọi là bệnh viêm vùng chậu (PID).

Vui lòng đọc thêm phần Thông Tin An Toàn Quan Trọng trong tập quảng cáo này và Thông Tin Kê Đơn Chi Tiết kèm theo.

Paragard là gì?

Paragard là một IUD (dụng cụ tránh thai đặt tử cung) nhỏ gọn, 100% không chứa hooc-môn, chỉ sử dụng duy nhất 1 hoạt chất đơn để tránh thai và cho hiệu quả hơn 99%.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe là người sẽ đặt dụng cụ này vào tử cung của quý vị khi quý vị đến thăm khám định kỳ tại văn phòng, và thủ thuật này chỉ mất vài phút. Sau khi đã đặt vào tử cung, Paragard sẽ phát huy tác dụng tránh thai liên tục trong thời gian ngắn hay dài tùy quý vị—tối đa là 10 năm.

Paragard được làm bằng nhựa mềm, dẻo bọc trong một lớp đồng mỏng. Sau khi đã đặt vào tử cung, quý vị sẽ không cảm thấy gì.



Tại sao nên dùng Paragard?



Hoàn toàn, tuyệt đối **100% không chứa hooc-môn**



Hiệu quả trên 99%—hiệu quả hơn bất kỳ biện pháp tránh thai không chứa hooc-môn nào khác*—và hiệu quả hơn hầu hết các biện pháp tránh thai chứa hooc-môn



Sản phẩm này phát huy tác dụng theo cách khác bằng cách chỉ sử dụng **1 hoạt chất đơn**—đồng.



Không chứa hooc-môn, **không gây tác dụng phụ liên quan đến hooc-môn**



Không phức tạp và **không cần duy trì nhiều**—không phải dùng thuốc hàng ngày hay phải mua thêm hàng tháng



Phát huy hiệu quả tới 10 năm nhưng có thể tháo ra sớm hơn bất cứ lúc nào nếu quý vị muốn mang thai†



Thời gian đặt vào tử cung nhanh, không cần phẫu thuật có thể thực hiện trong lần thăm khám định kỳ tại văn phòng, và thủ thuật này chỉ mất vài phút



IUD duy nhất đã được **FDA phê duyệt trong hơn 30 năm**



Có thể chi phải trả \$0 theo hầu hết các chương trình bảo hiểm‡

*Không bao gồm triệt sản.

†Thủ thuật tháo ra phải do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thực hiện.

‡Hãy kiểm tra với hãng bảo hiểm để xác minh lại về khoản đài thọ liên quan đến chương trình cá nhân của quý vị. Thủ thuật đặt Paragard vào tử cung có thể mất phí.

Thông Tin An Toàn Quan Trọng

- Nếu kỳ kinh nguyệt của quý vị bị chậm, quý vị bị đau bụng dai dẳng hay Paragard bị rơi ra, vui lòng báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (HCP) của quý vị biết. Nếu Paragard bị rơi ra, hãy sử dụng biện pháp tránh thai dự phòng.

Vui lòng đọc thêm phần Thông Tin An Toàn Quan Trọng trong tập quảng cáo này và Thông Tin Kế Đơn Chi Tiết kèm theo.

 **Paragard®**
intrauterine copper contraceptive
simple, honest pregnancy prevention™


Paragard Phát Huy Tác Dụng Như Thế Nào

T Sau khi đặt vào tử cung, Paragard sẽ bắt đầu phát huy tác dụng ngay

Cu Hoạt chất đồng trong Paragard có tác dụng ngăn tinh trùng tìm đến trứng và thụ tinh, đồng thời cũng có thể ngăn chặn quá trình làm tổ

Do Paragard 100% không chứa hooc-môn, nên không ảnh hưởng đến chu kỳ tự nhiên của cơ thể hay chặn quá trình rụng trứng hàng tháng

Rụng trứng đi kèm với tất cả các loại lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp—ảnh hưởng đến tâm trạng, làn da, xương, sức khỏe tim và thậm chí cả ham muốn tình dục của quý vị

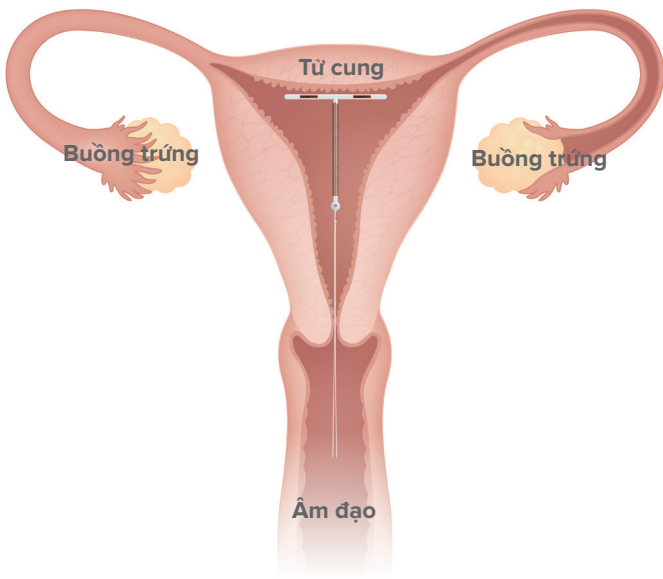

Thông Tin An Toàn Quan Trọng

- Trong một số trường hợp hiếm gặp, Paragard có thể bám vào tử cung hoặc xuyên qua tử cung và gây ra các vấn đề khác. Rất hiếm xảy ra tình trạng mang thai khi đang đặt Paragard, nhưng nếu xảy ra, biến cố này có thể gây vô sinh hoặc sảy thai.

Vui lòng đọc thêm phần Thông Tin An Toàn Quan Trọng trong tập quảng cáo này và Thông Tin Kê Đơn Chi Tiết kèm theo.



Quý vị có biết?

Hoạt chất đồng trong Paragard đã được FDA phê duyệt trong hơn 30 năm và đã được chứng minh về mặt lâm sàng là an toàn và hiệu quả.

 **Paragard®**
intrauterine copper contraceptive
simple, honest pregnancy prevention™

Nếu Đặt Paragard, Quý Vị Cần Làm Gì

Với Paragard, quý vị...

0

phải dùng hàng ngày

hay gặp phải những rắc rối khi mua thêm thuốc



1

lần kiểm tra sợi chỉ hàng tháng

do quý vị tự thực hiện



2

buổi hẹn thăm khám

- một buổi để đặt dụng cụ vào tử cung
- buổi còn lại vào khoảng một tháng sau đó để đảm bảo rằng Paragard nằm đúng vị trí*



Thông Tin An Toàn Quan Trọng

- Paragard không bảo vệ khỏi HIV hay STD.

Vui lòng đọc thêm phần Thông Tin An Toàn Quan Trọng trong tập quảng cáo này và Thông Tin Kê Đơn Chi Tiết kèm theo.

Đặt Paragard

Quý vị không phải phẫu thuật khi đặt Paragard vào tử cung, và thủ thuật này sẽ do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiến hành chỉ trong vài phút trong lần thăm khám định kỳ tại văn phòng. Một số phụ nữ có thể bị co thắt bụng, đau và/hoặc chóng mặt trong và sau khi đặt Paragard. Nhằm giảm việc bị co thắt bụng, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị về các loại thuốc giảm đau không cần theo đơn.

Sau khi đặt

Sau khi đã đặt vào tử cung, quý vị sẽ không thể cảm nhận thấy Paragard. Quý vị có thể tiếp tục sử dụng băng vệ sinh và quý vị hoặc bạn tình quý vị sẽ không cảm nhận thấy dụng cụ này trong khi giao hợp.

Quý vị có thể bị xuất huyết và chảy máu rỉ giọt nhiều hơn trong 2-3 tháng đầu, nhưng thường sẽ giảm dần theo thời gian. Nếu vẫn gặp phải tác dụng phụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Theo dõi

Hãy đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được kiểm tra khoảng một tháng sau khi đặt Paragard để đảm bảo Paragard nằm đúng vị trí.*

Quý vị nên hình thành thói quen kiểm tra xem Paragard có ở trong tử cung không bằng cách tự kiểm tra các sợi chỉ hàng tháng. Tiến hành bằng cách: dùng ngón tay sạch sờ vào đỉnh âm đạo để xem có thấy các sợi chỉ không, nhưng không được kéo các sợi chỉ đó ra. Nếu quý vị không thấy hay cảm thấy còn có vật gì khác ngoài sợi chỉ, hãy gọi ngay cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sử dụng biện pháp tránh thai dự phòng.

*Tùy thuộc vào những gì quý vị gặp phải, quý vị có thể cần phải đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhiều hơn để đảm bảo rằng Paragard nằm đúng vị trí.

 **Paragard®**
intrauterine copper contraceptive


simple, honest
pregnancy prevention™

[Paragard.com](https://www.paragard.com)

Paragard So Với Các Sản Phẩm Khác Thì Như Thế Nào?

Paragard cho hiệu quả hơn 99%—một trong những biện pháp tránh thai hiệu quả nhất hiện có.

Cho hiệu quả trên 99%

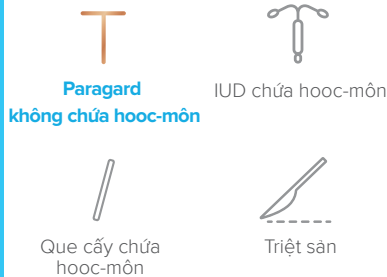

Hiệu quả 94%-98%



Hiệu quả 72%-88%



Paragard Có Phù Hợp Với Quý Vị Không?

Nếu quý vị trả lời "đồng ý" cho bất kỳ câu nào dưới đây, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị xem liệu Paragard có phù hợp với quý vị không.

1. Tôi thích một biện pháp tránh thai **100% không chứa hooc-môn**

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

2. Tôi muốn một biện pháp tránh thai cho **hiệu quả cao**

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

3. Trước đây, tôi đã từng **gặp phải tác dụng phụ bất lợi** sau khi dùng biện pháp tránh thai chứa hooc-môn

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

4. Tôi muốn **ngừng dùng biện pháp tránh thai chứa hooc-môn** vì tôi đã dùng biện pháp này nhiều năm rồi

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

5. Tôi muốn một biện pháp tránh thai **không phải duy trì nhiều** và không cần phải dùng hàng ngày

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

6. Tôi muốn một biện pháp tránh thai có **tác dụng lâu nhất nhưng có thể ngừng sử dụng** nếu tôi đổi ý

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

Thông Tin An Toàn Quan Trọng

- Quý vị có thể bị xuất huyết và chảy máu rỉ giọt nhiều hơn trong 2-3 tháng đầu, nhưng thường sẽ giảm dần theo thời gian.

Vui lòng đọc thêm phần Thông Tin An Toàn Quan Trọng trong tập quảng cáo này và Thông Tin Kê Đơn Chi Tiết kèm theo.

 **Paragard®**
intrauterine copper contraceptive
simple, honest
pregnancy prevention™

Paragard.com

Chi Phí & Khoản Đài Thọ Của Chương Trình Bảo Hiểm



Hầu hết phụ nữ có bảo hiểm đều chỉ phải trả \$0

Hầu hết các chương trình bảo hiểm đều đài thọ toàn bộ chi phí IUD Paragard—điều này có nghĩa là quý vị không phải chịu khoản đồng thanh toán, khoản khấu trừ, hay chi phí tự trả.*

Quý vị có thể kiểm tra xem chương trình bảo hiểm của quý vị có đài thọ cho Paragard hay không theo 2 cách:

1 Yêu cầu Báo Cáo Benefits VerificationSM (Xác Minh Quyền Lợi) Paragard miễn phí

Qua điện thoại:

1. Gọi đến số **1-877-PARAGARD**
2. Chuyên viên xác minh quyền lợi của chúng tôi sẽ giúp quý vị xác nhận khoản đài thọ liên quan tới chương trình cá nhân của quý vị

Trực tuyến:

1. Vui lòng truy cập **Paragardbvsp.com**
2. Điền thông tin và gửi Mẫu Đơn Ủy Quyền Của Bệnh Nhân bằng định dạng điện tử
3. Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị gửi Mẫu Đơn Giới Thiệu Bệnh Nhân
 - Sau khi chúng tôi đã nhận được cả hai mẫu đơn, quý vị sẽ nhận được bản báo cáo chi tiết, trong đó ghi rõ khoản đài thọ của chương trình bảo hiểm của quý vị đối với Paragard
 - Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hay cần trợ giúp trong quá trình này, xin gọi số **1-877-PARAGARD**

*Hãy kiểm tra với hãng bảo hiểm của quý vị để xác minh về khoản đài thọ liên quan đến chương trình cá nhân của quý vị. Thủ thuật đặt Paragard vào tử cung có thể mất phí.

Vui lòng đọc thêm phần Thông Tin An Toàn Quan Trọng trong tập quảng cáo này và Thông Tin Kê Đơn Chi Tiết kèm theo.

2 Hãy liên hệ trực tiếp với công ty bảo hiểm của quý vị

1. Hãy gọi đến số điện thoại của phòng dịch vụ khách hàng ghi ở mặt sau thẻ bảo hiểm của quý vị
2. Cho họ biết rằng Paragard là một biện pháp tránh thai do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thực hiện
3. Yêu cầu họ kiểm tra xem Paragard có được đài thọ theo Đạo Luật về Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền không
4. Cung cấp cho họ mã J của Paragard: **J7300**
5. Hỏi xem liệu quý vị có phải tự trả bất kỳ loại chi phí nào không, hay Paragard có phải là sản phẩm chỉ được đài thọ một phần theo chương trình của quý vị hay không



 **Paragard[®]**
intrauterine copper contraceptive
simple, honest
pregnancy prevention™

Quý vị muốn một sản phẩm không
chứa hooc-môn?

Hãy sử dụng Paragard.

100%
KHÔNG CHỨA
HOOC-MÔN

HIỆU QUẢ
TRÊN 99%

1 HOẠT CHẤT
ĐƠN

Vui lòng truy cập trang web Paragard.com
hoặc gọi điện tới số 1-877-PARAGARD.



Chỉ quý vị và HCP của quý vị mới có thể quyết định xem Paragard có phù hợp với
quý vị không. Sản phẩm chỉ bán theo đơn.

Khuyến khích báo cáo các phản ứng phụ bất lợi sau khi dùng thuốc theo đơn cho
FDA theo địa chỉ www.fda.gov/medwatch hoặc gọi điện đến số 1-800-FDA-1088.

Paragard là thương hiệu đã đăng ký của CooperSurgical, Inc.

© CooperSurgical © 2019 CooperSurgical, Inc. US-PAR-1900050 Tháng 6 năm 2019



Patient Package

Este panfleto también lo hay en español

INFORMATION FOR PATIENTS

Paragard® T 380A

Intrauterine Copper Contraceptive

Paragard® T 380A Intrauterine Copper Contraceptive is used to prevent pregnancy. It does not protect against HIV infection (AIDS) and other sexually transmitted diseases.

It is important for you to understand this brochure and discuss it with your healthcare provider before choosing Paragard® T 380A Intrauterine Copper Contraceptive (Paragard®). You should also learn about other birth control methods that may be an option for you.

What is Paragard®?

Paragard® is a copper-releasing device that is placed in your uterus to prevent pregnancy for up to 10 years.

Paragard® is made of white plastic in the shape of a "T." Copper is wrapped around the stem and arms of the "T". Two white threads are attached to the stem of the "T". The threads are the only part of Paragard® that you can feel when Paragard® is in your uterus. Paragard® and its components do not contain latex.



How long can I keep Paragard® in place?

You can keep Paragard® in your uterus for up to 10 years. After 10 years, you should have Paragard® removed by your healthcare provider. If you wish and if it is still right for you, you may get a new Paragard® during the same visit.

What if I change my mind and want to become pregnant?

Your healthcare provider can remove Paragard® at any time. After discontinuation of Paragard®, its contraceptive effect is reversed.

How does Paragard® work?

Ideas about how Paragard® works include preventing sperm from reaching the egg, preventing sperm from fertilizing the egg, and possibly preventing the egg from attaching (implanting) in the uterus. Paragard® does not stop your ovaries from making an egg (ovulating) each month.

How well does Paragard® work?

Fewer than 1 in 100 women become pregnant each year while using Paragard®.

The table below shows the chance of getting pregnant using different types of birth control. The numbers show *typical* use, which includes people who don't always use birth control correctly.

Number of women out of 100 women who are likely to get pregnant over one year

Method of birth control	Pregnancies per 100 women over one year
No Method	85
Spermicides	26
Periodic abstinence	25
Cap with Spermicides	20
Vaginal Sponge	20 to 40
Diaphragm with Spermicides	20
Withdrawal	19
Condom without spermicides (female)	21
Condom without spermicides (male)	14
Oral Contraceptives	5
IUDs, Depo-Provera, implants, sterilization	less than 1

Who might use Paragard®?

You might choose Paragard® if you

- need birth control that is very effective
- need birth control that stops working when you stop using it
- need birth control that is easy to use


Who should not use Paragard®?

You should not use Paragard® if you

- Might be pregnant
- Have a uterus that is abnormally shaped inside
- Have a pelvic infection called pelvic inflammatory disease (PID) or have current behavior that puts you at high risk of PID (for example, because you are having sex with several men, or your partner is having sex with other women)
- Have had an infection in your uterus after a pregnancy or abortion in the past 3 months
- Have cancer of the uterus or cervix
- Have unexplained bleeding from your vagina
- Have an infection in your cervix
- Have Wilson's disease (a disorder in how the body handles copper)
- Are allergic to anything in Paragard®
- Already have an intrauterine contraceptive in your uterus

How is Paragard® placed in the uterus?

Paragard® is placed in your uterus during an office visit. Your healthcare provider first examines you to find the position of your uterus. Next, he or she will cleanse your vagina and cervix, measure your uterus, and then slide a plastic tube containing Paragard® into your uterus. The tube is removed, leaving Paragard® inside your uterus. Two white threads extend into your vagina. The threads are trimmed so they are just long enough for you to feel with your fingers when doing a self-check. As Paragard® goes in, you may feel cramping or pinching. Some women feel faint, nauseated or dizzy for a few minutes afterwards. Your healthcare provider may ask you to lie down for a while and to get up slowly.

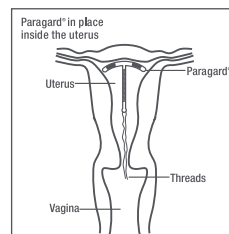

How do I check that Paragard® is in my uterus?

Visit your healthcare provider for a check-up about one month after placement to make sure Paragard® is still in your uterus.

You can also check to make sure that Paragard® is still in your uterus by reaching up to the top of your vagina with clean fingers to feel the two threads. Do not pull on the threads.

If you cannot feel the threads, ask your healthcare provider to check if Paragard® is in the right place. If you can feel more of Paragard® than

just the threads, Paragard® is *not* in the right place. If you can't see your healthcare provider right away, use an additional birth control method. If Paragard® is in the wrong place, your chances of getting pregnant are increased. It is a good habit for you to check that Paragard® is in place once a month.

You may use tampons when you are using Paragard®.

What if I become pregnant while using Paragard®?

If you think you are pregnant, contact your healthcare professional *right away*. If you are pregnant and Paragard® is in your uterus, you may get a severe infection or shock, have a miscarriage or premature labor and delivery, or even die. Because of these risks, your healthcare provider will recommend that you have Paragard® removed, even though removal may cause miscarriage.

If you continue a pregnancy with Paragard® in place, see your healthcare provider regularly. Contact your healthcare provider right away if you get fever, chills, cramping, pain, bleeding, flu-like symptoms, or an unusual, bad smelling vaginal discharge.

A pregnancy with Paragard® in place has a greater than usual chance of being ectopic (outside your uterus). Ectopic pregnancy is an emergency that may require surgery. An ectopic pregnancy can cause internal bleeding, infertility, and death. Unusual vaginal bleeding or abdominal pain may be signs of an ectopic pregnancy.

Copper in Paragard® does not seem to cause birth defects.

What side effects can I expect with Paragard®?

The most common side effects of Paragard® are heavier, longer periods and spotting between periods; most of these side effects diminish after 2-3 months. However, if your menstrual flow continues to be heavy or long, or spotting continues, contact your healthcare provider.


Infrequently, serious side effects may occur:

- Pelvic inflammatory disease (PID): Uncommonly, Paragard® and other IUDs are associated with PID. PID is an infection of the uterus, tubes, and nearby organs. PID is most likely to occur in the first 20 days after placement. You have a higher chance of getting PID if you or your partner have sex with more than one person. PID is treated with antibiotics. However, PID can cause serious problems such as infertility, ectopic pregnancy, and chronic pelvic pain. Rarely, PID may even cause death. More serious cases of PID require surgery or a hysterectomy (removal of the uterus). Contact your healthcare provider right away if you have any of the signs of PID: abdominal or pelvic pain, painful sex, unusual or bad smelling vaginal discharge, chills, heavy bleeding, or fever.
- Difficult removals: Occasionally Paragard® may be hard to remove because it is stuck in the uterus. Surgery may sometimes be needed to remove Paragard®.
- Perforation: Rarely, Paragard® goes through the wall of the uterus, especially during placement. This is called perforation. If Paragard® perforates the uterus, it should be removed. Surgery may be needed. Perforation can cause infection, scarring, or damage to other organs. If Paragard® perforates the uterus, you are not protected from pregnancy.
- Expulsion: Paragard® may partially or completely fall out of the uterus. This is called expulsion. Women who have never been pregnant may be more likely to expel Paragard® than women who have been pregnant before. If you think that Paragard® has partly or completely fallen out, use an additional birth control method, such as a condom and call your healthcare provider.

You may have other side effects with Paragard®. For example, you may have anemia (low blood count), backache, pain during sex, menstrual cramps, allergic reaction, vaginal infection, vaginal discharge, faintness, or pain. This is not a complete list of possible side effects. If you have questions about a side effect, check with your healthcare provider.

When should I call my healthcare provider?

Call your healthcare provider if you have any concerns about Paragard®. Be sure to call if you

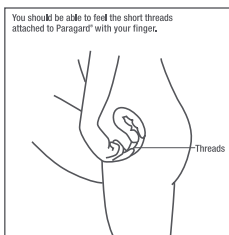

- Think you are pregnant
- Have pelvic pain or pain during sex
- Have unusual vaginal discharge or genital sores
- Have unexplained fever
- Might be exposed to sexually transmitted diseases (STDs)
- Cannot feel Paragard®'s threads or can feel the threads are much longer
- Can feel any other part of the Paragard® besides the threads
- Become HIV positive or your partner becomes HIV positive
- Have severe or prolonged vaginal bleeding
- Miss a menstrual period

General advice about prescription medicines

This brochure summarizes the most important information about Paragard®. If you would like more information, talk with your healthcare provider. You can ask your healthcare provider for information about Paragard® that is written for healthcare professionals.

Checklist

This checklist will help you and your healthcare provider discuss the pros and cons of Paragard® for you. Do you have any of the following conditions?

	Yes	No	Don't know
Abnormal Pap smear	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abnormalities of the uterus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allergy to copper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anemia or blood clotting problems	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bleeding between periods	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cancer of the uterus or cervix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fainting attacks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Genital sores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heavy menstrual flow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HIV or AIDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infection of the uterus or cervix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IUD in place now or in the past	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
More than one sexual partner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pelvic infection (PID)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Possible pregnancy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repeated episodes of pelvic infection (PID)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serious infection following a pregnancy or abortion in the past 3 months	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Severe menstrual cramps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sexual partner who has more than one sexual partner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sexually transmitted disease (STD) such as gonorrhea or chlamydia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wilson's disease	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cooper Surgical

Cooper Surgical, Inc.
95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611
USA

P/N 1016806
Iss. 03/2019